


## INSTRUKCJA UŻYWANIA

# Termometr elektroniczny PEMPA T20 FLEXI

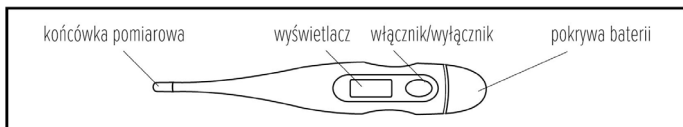

## 1. PRZYGOTOWANIE DO POMIARU

Na 30 minut przed wykonaniem pomiaru nie należy brać kąpeli, ćwiczyć, palić papierosów ani jeść. Pomiaru temperatury należy dokonywać zawsze w tym samym miejscu, ponieważ różne obszary ciała mogą dawać odmienne wyniki.

Wyniki pomiarów temperatury ciała dokonane o różnych porach dnia mogą się nieznacznie różnić. Temperatura jest najwyższa wieczorem, a najniższa około 1 godziny przed przebudzeniem.

Nie należy zabierać termometru z miejsca pomiaru, dopóki nie pojawi się końcowy sygnał dźwiękowy.

Nie należy poruszać się i rozmawiać w trakcie pomiaru.

Nie należy podejmować prób stawiania samodzielnej diagnozy i leczenia na podstawie temperatury ciała. Należy skonsultować się z lekarzem. Samodzielna diagnoza może spowodować pogorszenie stanu zdrowia.

## 2. SPOSÓB WYKONANIA POMIARU

1. Należy nacisnąć włącznik (ON). Na wyświetlaczu wyświetlą się na 2 sekundy wszystkie pola celem testu urządzenia.
2. Następnie wyświetli się wynik ostatniego zapamiętanego pomiaru z ikoną "M" w prawym dolnym rogu wyświetlacza.
3. Kolejno wyświetli się symbol "L" oraz migające "°C", wówczas termometr jest gotowy do pomiaru. Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 32°C, zostanie wyświetlona na wyświetlaczu termometru.
4. Sygnał dźwiękowy powiadomi o zakończeniu pomiaru.
5. Aby wyłączyć termometr, należy wcisnąć wyłącznik (OFF). Automatycznie wyłączenie następuje po około 8 minutach od ukończenia pomiaru.

## 3. MIEJSCA POMIARU

### Pomiar w ustach - czas pomiaru min. 1 minuta

1. Należy umieścić termometr pod językiem.
2. Należy docisnąć końcówkę termometru językiem.
3. Należy podtrzymać termometr ręką, aby nie dopuścić do jego przesuwania się.  
Nie należy otwierać ust w trakcie pomiaru.

### Pomiar pod pachą - czas pomiaru 2-3 minuty

1. Przed pomiarem skórę pod pachą należy osuszyć.
2. Termometr należy umieścić w dole pachwowym. Ramiona skrzyżować na klatce piersiowej, co pomoże zapewnić pełny kontakt końcówki pomiarowej ze skórą.  
Uwaga: Temperatura pod pachą będzie o około 0.5°C niższa niż uzyskana w ustach.

### Pomiar doodbytniczy - czas pomiaru min. 1 minuta

Końcówkę termometru przed pomiarem można posmarować np. olejkami dla niemowląt w celu łatwiejszej aplikacji i wsunąć ją do odbytu na głębokość około 2 cm.


Uwaga: Temperatura w odbycie będzie o około 0.5°C wyższa niż uzyskana w ustach.

## 4. SPOSÓB WYMIANY BATERII

Bateria w termometrze powinna być wymieniona, gdy na wyświetlaczu po prawej stronie pojawi się symbol wyczerpanej baterii ( ). Bateria zastosowana do zasilania urządzenia to 1,5 V AG 3 (alkaliczna) lub LR 41 (tlenek srebra).

### Aby wymienić baterię, należy:

1. zdjąć pokrywę baterii z termometru,
2. wysunąć mocowanie baterii na około 18 mm,
3. użyć odpowiedniego narzędzia, aby wyciągnąć baterię z mocowania (np. pęsety).  
Następnie zamontować nową baterię.

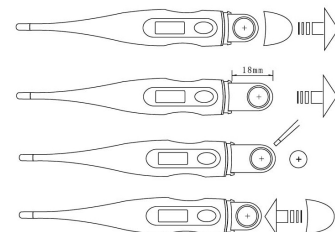

## 5. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Najlepszym sposobem czyszczenia termometru jest użycie szmatki zwilżonej środkiem dezynfekcyjnym (np. 70-procentowym roztworem alkoholu etylowego).

## 6. PRZECHOWYWANIE

Termometr należy przechowywać z dala od źródeł ciepła lub miejsc narażonych na działania promieni słonecznych. Termometr nie jest zabawką. Należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## 7. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Termometr powinien być używany w obecności osoby dorosłej.
2. Nieużywany termometr należy przechowywać w opakowaniu ochronnym.
3. Nie należy wystawiać termometru na działanie słońca i ekstremalnych temperatur.
4. Wyświetlacz i pokrywa baterii nie mogą być narażone na działanie wody.
5. Gwałtowne uderzenie lub upadek mogą uszkodzić urządzenie.
6. Nie otwierać urządzenia - wyjętek stanowi wymiana baterii.

## 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres pomiarowy	32,0-42,9°C
Sygnalizacja zbyt niskiej temperatury	temperatura poniżej 32,0°C - wyświetlony znacznik 1°C
Sygnalizacja zbyt wysokiej temperatury	temperatura poniżej 42,9°C - wyświetlony znacznik H°C
Dokładność	w zakresie 35,0-42,0°C +/- 0,1°C w temperaturze otoczenia 18-28°C
Podziałka	0,1°C
Sygnał dźwiękowy	10 długich sygnałów dźwiękowych w czasie 10 sekund
Sygnał dźwiękowy informujący o zakończonym pomiarze	30 krótkich sygnałów dźwiękowych w czasie 10 sekund
Autowylączenie	8 minut +/- 2 minuty
Bateria	1,5 V AG 3 lub LR 41
Żywotność baterii	2 lata lub 2500 pomiarów
Rozmiar	125 mm x 18 mm x 11 mm
Waga	około 9,8 g (z baterią)
Warunki używania	temperatura od 10°C do 40°C, wilgotność 30-85%
Warunki przechowywania	temperatura od -10°C do +60°C, wilgotność 25-90%







## 9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI (DYREKTYWA 2002/96/WE-WEEE)

Urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Urządzenia zawiera składniki niebezpieczne dla środowiska. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów oraz uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które mogą być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Przestrzegając tych zasad, użytkownik przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklinu, zużytego sprzętu. W razie wątpliwości, gdzie oddać zużyty produkt, należy skontaktować się z firmą CHDE Polska, tel. 801 811 811.

## 10. GWARANCJA

Niniejsze urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją, licząc od daty zakupu potwierdzonej rachunkiem nabywcy, który należy dołączyć do niniejszej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne, nie obejmuje natomiast przypadkowych uszkodzeń z nieprawidłowego użytkowania, zaniedbań lub stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Należy stosować wyłącznie akcesoria dostarczone przez producenta: użycie akcesoriów innych niż zatwierdzone spowoduje utratę gwarancji. Nigdy nie należy otwierać urządzenia, jakiegokolwiek otwarcie lub próba otwarcia urządzenia spowoduje automatyczną utratę gwarancji. Gwarancja nie obejmuje części podlegających zużyciu ani baterii (o ile są dołączone). Okres gwarancji wynosi 2 lata, licząc od daty zakupu, po upływie tego okresu wszelkie naprawy będą wykonywane odpłatnie.

## SYMBOLE UŻYTE NA OPAKOWANIU

	Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji
SN	Numer serii
	Wytwórca
	Chroń przed światłem słonecznym
	Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi
	Uwaga
CE 0123	Znak CE oraz numer jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie zgodności
EC REP	Autoryzowany przedstawiciel
	Urządzenie typu B

### IMPORTER:

CHDE POLSKA S.A.  
UL. BIESIADNA 7  
35-304 RZESZÓW



KANGFU MEDICAL EQUIPMENT FACTORY  
NO. 380 NINGKANG EAST ROAD  
325600 YUEQING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

EC REP

LUXUS LEBENSWELT GMBH  
KOCHSTR. 1,47877, WILlich, GERMANY

Data wydania instrukcji: 10.2020

CE 0123